



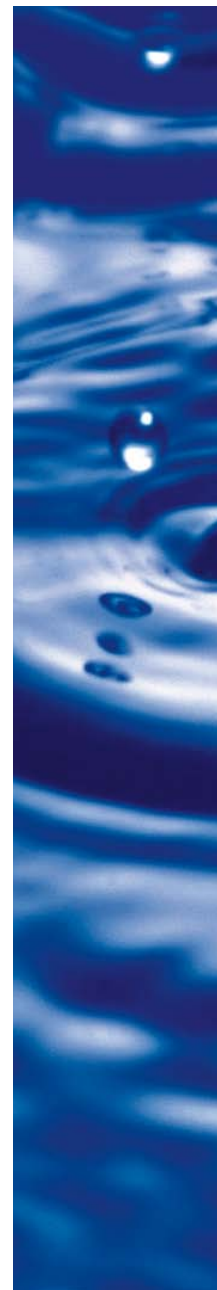

AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych i małych powierzchni wyrobów medycznych i innego wyposażenia odporne-go na działanie alkoholi.

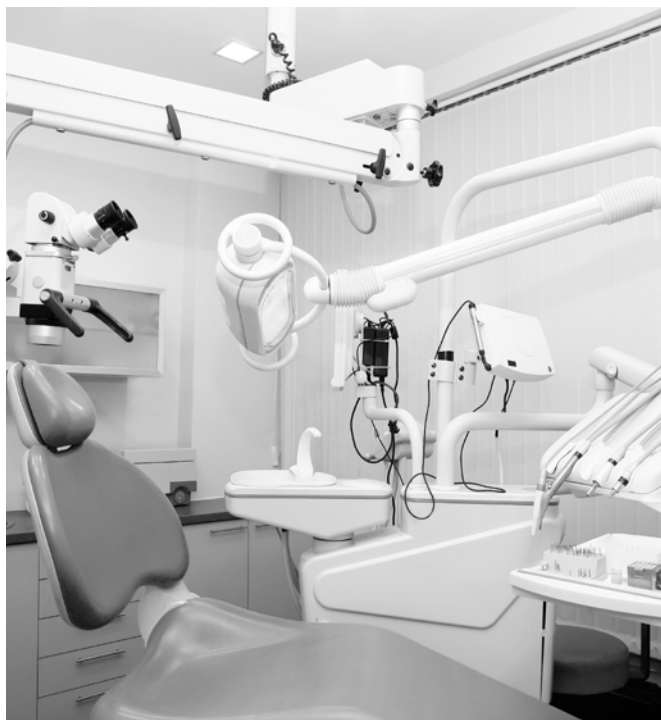

- preparat na bazie alkoholi
- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- przyjemny delikatny zapach
- błyskawicznie schnie
- nie pozostawia żadnych śladów
- ponad 20 lat na rynku

Preparat gotowy do użycia



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0482

AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych i małych powierzchni wyrobów medycznych i innego wyposażenia odpornego na działanie alkoholi.

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
- szerokie spektrum bibójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
- do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki
- preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
- charakteryzuje się przyjemnym delikatnym zapachem
- sprawdzony preparat z 20 letnią historią na rynku polskim

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliowirus)
- 30 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliowirus, Poliovirus)

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
- Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
- Nanosić na dezynfekowane powierzchnie i przedmioty bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej z odległości 30 cm lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab).



1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 1 minutę.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

OPAKOWANIA

- Aerodesin 2000: butelka 1 litr ze spryskiwaczem
- Aerodesin 2000: kanister – 5 litrów
- Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Lysoform GmbH, Niemcy

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel./fax: 85 743 28 97 • www.medilab.pl

