

SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Incidin® Foam

Pianka gotowa do użycia

Szybka dezynfekcja powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi.

- ▲ Gotowy do użycia
- ▲ Bez aldehydów
- ▲ Działa w krótkim czasie



Incidin® Foam

Pianka gotowa do użycia

Dlaczego Incidin® Foam?

Produkt cechuje: szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc) i grzyby. Został przetestowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) – działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV), ponadto aktywny wobec wirusów Vaccinia, Adeno, Papova i Rota. Produkt jest gotowy do użycia. Ma optymalnie dobrany skład. Dozowany w postaci piany o świeżym cytrynowym zapachu. Cechuje się szczególnie krótkim czasem działania i przeprowadzonymi na szeroką skalę badaniami tolerancji materiałowej. Opakowanie nie zawiera freonu. Posiada pozytywną opinię IMiDz nr ZF-K-35/07/11.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Bezpieczna, pewna dezynfekcja wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, mebli medycznych i płyt akrylowych.
- ▲ Łatwe stosowanie, możliwość natychmiastowego użycia.
- ▲ Widoczne pokrycie dezynfekowanej powierzchni. Eliminacja mgły aerozolowej – większe bezpieczeństwo użytkownika.

- ▲ Nie zawiera aldehydów, doskonała tolerancja przez użytkownika.
- ▲ Dobre pokrycie dezynfekowanej powierzchni, dzięki zawartemu alkoholowi szybkie wysychanie, znakomite właściwości czyszczące.
- ▲ Szybko zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i personelowi. Zwiększa częstotliwość wykorzystania aparatury, sprzętu rehabilitacyjnego etc.
- ▲ Przyjemne warunki pracy, odczuwalne „poczucie czystości” u pacjentów.
- ▲ Przyjazny dla środowiska.
- ▲ Potwierdzone działanie dezynfekcyjne.
- ▲ Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▲ Produkt został zatwierdzony do dezynfekcji inkubatorów TSE spol. s r.o.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni wg. VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) z udziałem, jak i bez udziału czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżobójczy) (warunki czyste i brudne)	5 min.
Dezynfekcja powierzchni wg. DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) z udziałem, jak i bez udziału czynnika mechanicznego, metodyka 2001r. (prątkobójczy) (warunki czyste i brudne)	5 min.
Szybka dezynfekcja powierzchni z udziałem, jak i bez udziału czynnika mechanicznego wg. DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), metodyka 2001r. (bakteriobójczy, drożdżobójczy) (warunki czyste i brudne)	1 min.
Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) - zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004	1 min.
Adeno	1 min.
Papova, Rota	30 sek.
Parametry wg PZH B, F (dezynfekcja poprzez spryskanie, zmywanie)	10 min.
EN 13727 bakteriobójczy	30 sek.
EN 13624 drożdżobójczy	30 sek.
EN 14348 prątkobójczy	3 min.

CE 0297

Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Preparat jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji czystych powierzchni takich jak: aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, fotele zabiegowe, stelaże łóżek, leżanki, płyty akrylowe i inne powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Roztwór gotowy do użycia. Spryskać (40 ml/m²) z odległości ok. 30 cm nierozcieńczonym preparatem dezynfekowane powierzchnie, pozostawić do wyschnięcia (1 do 10 min.), a następnie przetrzeć ręcznikiem jednorazowym. Ewentualnie nierozcieńczony produkt nanieść na ręcznik papierowy i przetrzeć nim dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia (1 do 10 min).

SKŁAD

100 g preparatu zawiera jako substancje czynne:
20 g 2-propanol, 10 g etanol,
0,2 g chlorek benzyloalkiloamonowy,
0,01 g glukoprotamina.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Butelka 750 ml ze spryskiwaczem pianowym	16 szt.	3046010
Kanister 5 l	2 szt.	3013440

OPINIE

Liczne badania mikrobiologiczne, wirusologiczne, toksykologiczne i ekologiczne - na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie.
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.