

Medi Spray

Alkoholowy gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego

- ◆ Szybki czas działania od 30 sek.
- ◆ Idealna powierzchnia bez smug
- ◆ Gotowy do użycia
- ◆ Zapach neutralny



Medi Spray zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.



Cechy produktu:

- ◆ Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885).
- ◆ Wyjątkowe właściwości myjące bez cienia smug.
- ◆ Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów i fenoli).
- ◆ Nie zawiera substancji zapachowych.

Korzyści dla użytkownika:

- ◆ Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- ◆ Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- ◆ Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- ◆ Możliwość zastosowania do wielu materiałów.
- ◆ Idealny dla personelu wrażliwego na zapachy.

Zastosowanie:

Medi Spray zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Preparat można stosować do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie i idealną czystość bez smug. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie, a następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: etanol, propan-2-ol

Opakowanie: butelka 1 L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Środki ostrożności:

Informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem dostępne są w karcie charakterystyki produktu na stronie www.medisep.com.pl

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych.

CE 2274



Data opracowania: 01.2016

